

# レパーサ®皮下注140mgペン 自己注射の方法


## 腹部・大腿部(太もも)に注射する場合

### 注射前の準備

外箱を冷蔵庫から取り出し、室温で30分以上待ちます。  
注射部位を消毒綿で消毒して、皮膚を乾かします。

腹部の場合  
(へそのまわり5cm以内は  
避けましょう)

大腿部(太もも)の場合

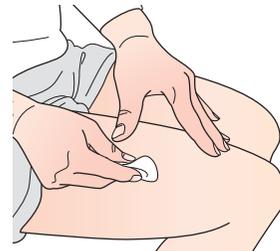


消毒したところには  
注射するまで  
触れないでください。

本製品を3本投与する場合

- 通常の手順に従って投与します。
- 注射する部位(左右大腿部、腹部、左右上腕部の外側)を順番に変更します。  
\*上腕部の外側は、患者自身では投与できません。
- 30分以内に連続3回投与します。

オレンジのキャップを真っ直ぐに引き抜いて、外します。  
外したら5分以内に注射してください。針内の薬液が  
乾き注射できないことがあります。

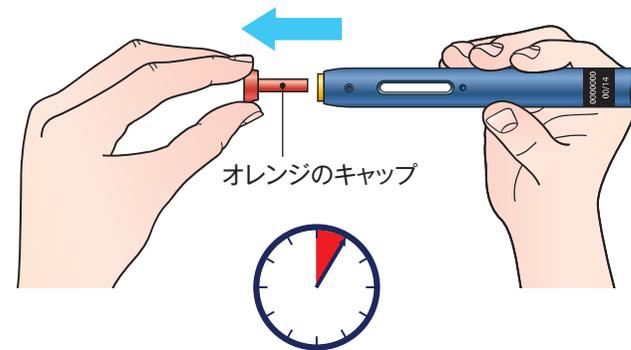

オレンジのキャップ

5分以内に  
注射する

注射する部位(大腿部、腹部)を引き伸ばすか、またはつまんで、皮膚の表面を硬くします。オレンジのキャップを外した  
ペンを注射部位に直角にあてます。


引き伸ばす



まだ、灰色のスタートボタンには  
触れないでください。

または

つまむ

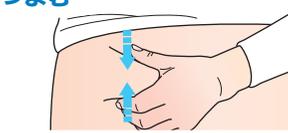


### 自己注射の3つのポイント

#### ① 皮膚に押し込む

先端の黄色い部分が見えなくなるまで、しっかりと皮膚に押し  
込みます。

注射が完了するまで押し込んだままにしてください。

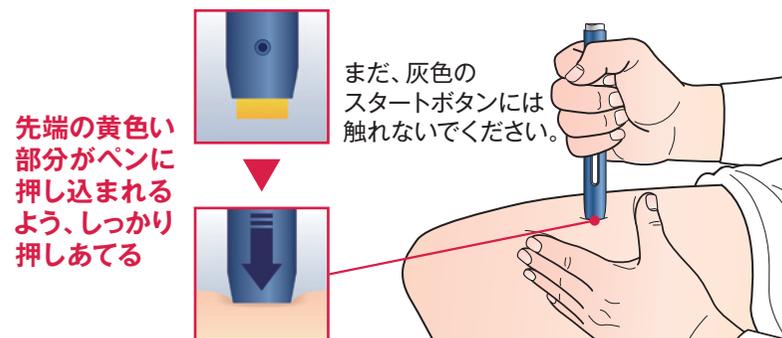


先端の黄色い  
部分がペンに  
押し込まれる  
よう、しっかり  
押しあてる

まだ、灰色の  
スタートボタンには  
触れないでください。

黄色の安全カバーを確実に皮膚に押し込んでください。

#### ② スタートボタンを押す

灰色のスタートボタンを押すと、「カチッ」という音がします。  
注射が始まる(薬液確認窓が黄色に変わり始める)まで押し  
たままにしてください。

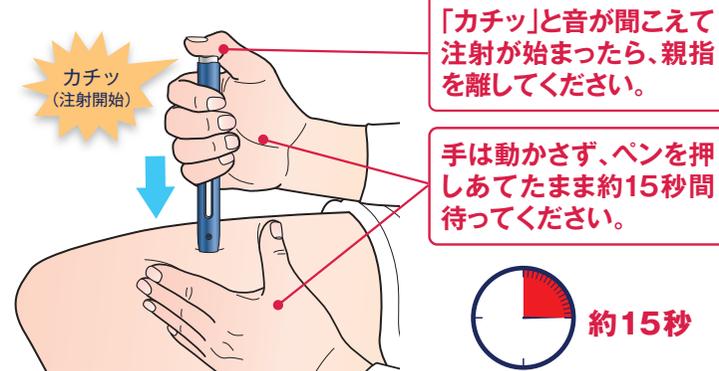

カチッ  
(注射開始)


「カチッ」と音が聞こえて  
注射が始まったら、親指  
を離してください。

手は動かさず、ペンを押  
しあてたまま約15秒間  
待ってください。

約15秒

#### ③ 確認する

注射が始まったら親指を離し、レパーサ®皮下注140mgペンを  
押しあてたまま約15秒間待ってください。薬液確認窓が完全  
に黄色になり、注射が終了したことを確認してください。

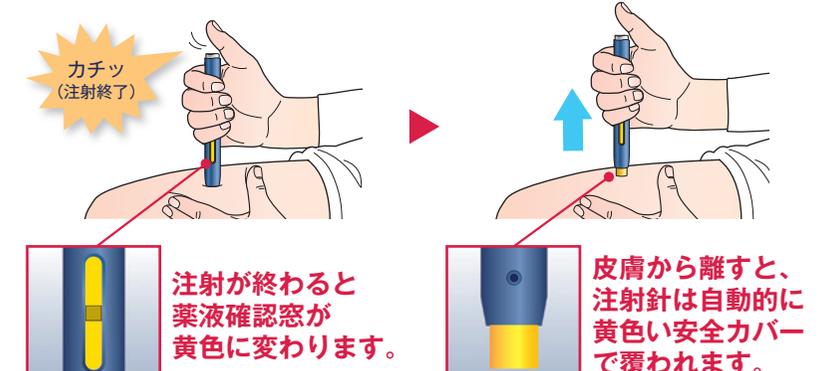

カチッ  
(注射終了)

注射が終わると  
薬液確認窓が  
黄色になります。

皮膚から離すと、  
注射針は自動的に  
黄色い安全カバー  
で覆われます。